





Savvy5330 3-1交替防压疮交替气垫床,数位智慧型泵浦可搭配4寸18管床垫,有效减低皮肤受压,预防及改善压疮发生,适合压疮低、中、高风险病患。

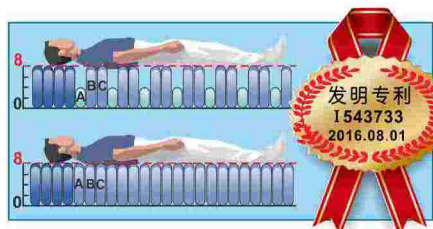

唐德发明专利 完全交替不晕床 睡得更安稳


床垫维持固定高度,不因床管充泄气而上下移动造成晕床现象。完全交替技术使床管皆充气至同一高度后再进行泄气,气垫床高度不变增添使用者舒适度及睡眠品质。

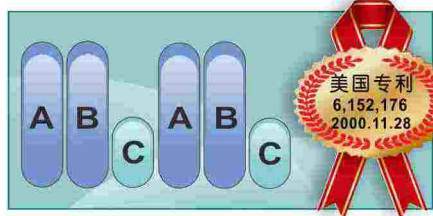

唐德发明专利 3-1交替减压 睡得更舒适

床垫设计2/3床管充气,1/3床管泄气,一方面既达到交替减压的目的,另一方面仍有2/3的床管在支撑人体,舒适性更优于2-1交替减压。

3-1交替减压为唐德1998年之专利设计,目前受业界广为认可追随及仿效。

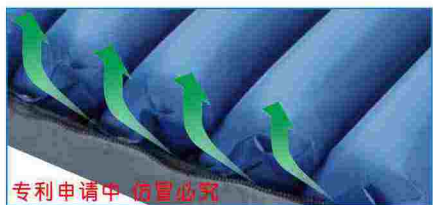

唐德独家设计 独立式微漏气 (iLAL) 睡得更乾爽

利用床管交替时所排出的空气送回床垫内,藉以带走气垫床多余的热气及湿气,降低床垫温度确保床垫乾爽舒适,每次交替约有1/3床垫体积的空气经由30个1.5mm的小孔排出,最大可达40-50公升,停电时仍可持续支撑病患可达24小时。一般气垫床於床管设置直径约0.1mm喷气孔,整床约含10~30小孔,两者喷气孔面积相差高达225倍,停电时无法支撑病患提高褥疮产生风险。



唐德独家设计 相对压力校准 睡得更香甜


不论高山或平地、夏天或冬天、白天或晚上,唐德采用相对压力校准,达到气垫床软硬恒定,不因环境温差及海拔地形的变化而压力失准。



床罩采用 医疗级双向弹性布 睡得更安心

通过多项生物相容性测试之双向弹性布可减少肌肤与床罩所产生的剪力与摩擦力,有效防止压疮的产生。使用可拆式塑钢拉链,上罩,可用洗衣机与烘乾机水洗与烘乾。



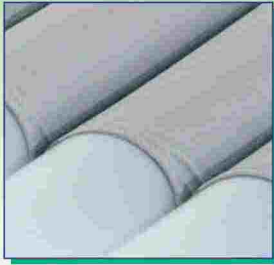

车缝固定鸟眼布床管固定带可防止气垫床使用时造成的滑动,传统塑胶固定带易脱落且无法维修,一旦损坏需更换整组下罩



弹力式挂勾,操作不晃动,降低因震动引起之噪音



唐德专利床管快接,拆装容易,方便床管更换

数位智慧型变频空气泵浦



8段压力调整搭配自动体型侦测调压功能



面板自动锁定功能



具交替和护理模式



有声异常警报



自行设定交替时间



自动充气缓解搬运病人时的负担,并可於病人坐起时加压防止"Bottoming-out"

产品规格

泵 浦		气 垫 床	
交替模式	3-1交替减压	尺 寸(长x宽x高)	190x85x10公分
尺 寸(长x宽x高)	31x10x20 公分	重 量	5公斤
重 量	2.8 公斤	最大载重	135 公斤
控制方式	电子式(数位按键+LED显示器)	头枕功能	3管定压
流 量	>7.0L	床管数	18管
可调压力范围	8段15~50 (+/-5)mmHg	床管材质	尼龙+TPU聚氨酯(醚类)
电压 / 频率	230V/50Hz	上罩材质	双向弹性布(防水透湿, 生物相容, 防火等级 CAL 117)
交替循环时间	10 / 15 / 25 / 30 分钟	底垫材质	聚酯纤维+PU聚氨酯
静态自动转交替	20 分钟	CPR快速泄气	拉式
有声异常警报	断电警报 / 低压警报 / 服务警报 错误代码检视		
保险丝额定	T1A / 250V		
外壳防尘防水等级	IP21		
安规认证	IEC60601-1 医疗电子器材电性安全测试 IEC60601-1-2 电磁相容性		

唐德工业股份有限公司

324 台湾桃园市平镇区涌丰里工业五路3号
消费者服务专线: 0800-211-365
电话: (03)419-4567 传真: (03)469-3789
电邮: service@aktc.com.tw
网址: www.aktc.com.tw

代理及售后机构: 云南益健贸易有限公司
地址: 昆明市白塔路308号1单元404
电话: 0871-63183456 手机: 13354646200